

## Cleanic i Pro-Cup – pytania i odpowiedzi



### **Od wielu lat stosuję Cleanic w opakowaniach jednorazowych i pojemnikach. Po pierwszej aplikacji pasty w tubie nie jestem zadowolony – pasta rozpryskuje się. Dlaczego?**

Pasta w tubie ma gęstość mniejszą od pasty Cleanic w opakowaniach jednorazowych czy pojemnikach i może być bardziej podatna na rozpryskiwanie. Zjawisko to można ograniczyć stosując końcówkę z liczbą obrotów do 3000/min i – jeżeli to możliwe – **gumki Pro-Cup**, które posiadają strukturę blaszkowatą, eliminującą rozpryskiwanie pasty.

### **Czy Cleanic w tubach jest mniej abrazyjny od pasty Cleanic w pojemnikach lub opakowaniach jednorazowych? Czy dla wszystkich trzech wersji pasty wartość RDA jest taka sama?**

RDA wszystkich wersji pasty Cleanic wynosi 27, niezależnie od opakowania – każda z past Cleanic zawiera taką samą ilość perlitu (w % wag.). Pasty w tubach są miękkie, co sprawia, że wydają się mniej abrazyjne, jednak badania tego nie potwierdzają.

### **Nie lubię gumek Pro-Cup – rozpadają się po czwartym użyciu...**

Gumki Pro-Cup przeznaczone są do jednorazowego użycia, zgodnie z symbolem na opakowaniu.

### **Czy Pro-Cup Soft (jasnoniebieskie, miękkie) są mniej efektywne od Pro-Cup Hard (ciemnoniebieskie, twarde)?**

Nie. Efekt zabiegu jest taki sam, a wybór twardości gumki Pro-Cup zależy od preferencji użytkownika.

### **Do zabiegów profilaktycznych stosuję piaskarkę - naprawdę nie potrzebuję past profilaktycznych!**

Badania naukowe wskazują, że po zastosowaniu Cleanic uzyskuje się najmniejszą ostateczną chropowatość powierzchni. Z tego powodu, nawet po zabiegu piaskowania, w każdym przypadku należy zastosować pastę Cleanic. Dotyczy to również innych metod, np. ultradźwięków, zabiegów z użyciem past o większej abrazyjności, itp.

### **Dlaczego pasta Cleanic jest tak wyjątkowa?**

Pasty innych firm, nawet jeżeli są dostępne w różnych smakach, posiadają intensywny aromat. Cleanic oferuje pacjentowi nowe doświadczenie, z odpowiednio dopasowaną intensywnością aromatu. Cleanic o smaku zielonego jabłka jest jedyną pastą profilaktyczną wolną od mentolu.