



Wybierz bagaż doświadczeń.
25 lat marki Herculite®.



Twoja praktyka jest naszą inspiracją.™







Wybierz bagaż doświadczeń.
25 lat marki Herculite®.

Spełnione obietnice

25 lat to czas wystarczający, aby udowodnić, że przemyślane rozwiązania przynoszą wymierne korzyści tym, którzy je stosują.

Herculite XRV jest jedynym kompozytem na świecie, który pozostaje w sprzedaży od tak wielu lat i nadal cieszy się niezmiennym powodzeniem. Dlaczego? Bo spełnił oczekiwania dotyczące jakości, trwałości i estetyki. Wciąż spełnia, pomimo bogatej oferty materiałów do wypełnień na rynku... i na zawsze pozostanie synonimem uniwersalnego materiału kompozytowego.

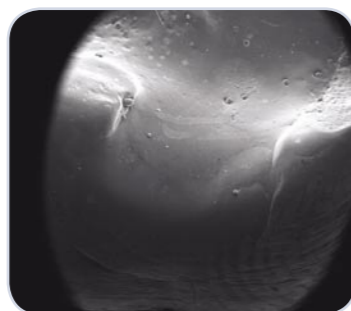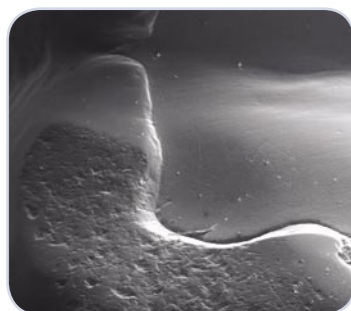

Zdjęcia z mikroskopu skaningowego przedstawiające repliki zębów z wypełnieniami z materiału Herculite XRV po 14 latach od momentu wykonania zabiegu. Do połączenia materiału z tkankami zastosowano system wiążący OptiBond FL.
Zdjęcie lewe: ząb 37, wypełnienie na powierzchni żującej. Widoczne niewielkie starcie materiału, którego nie obserwuje się klinicznie. Zwraca uwagę doskonała integracja brzeżna wypełnienia ze szkliwem.
Zdjęcie prawe: ząb 26, wypełnienie na powierzchni podniebiennej. Widoczna doskonała integracja materiału ze szkliwem, bez jakiegokolwiek starcia powierzchni kompozytu.
Zdjęcia dzięki uprzejmości
dr n. med. Doroty Gajdzik-Pluteckiej.

Trwałość i estetyka

Doskonałe właściwości produktu potwierdzają wyniki długoczasowych badań klinicznych...

A clinical evaluation of posterior composite restorations: 17-year findings. da Rosa Rodolpho PA, Cenci MS, Donassollo TA, Loguercio AD, Demarco FF., J Dent. 2006 Aug;34(7):427-35. Epub 2005 Nov 28.

Motoda: W latach 1987-1988, w prywatnej praktyce stomatologicznej, u 38 pacjentów wykonano 282 wypełnienia z materiałów P-50 (3M) i Herculite XR (Kerr). Wypełnienia zakładano z zastosowaniem koferdamu, po pokryciu zębiny cementem szkło-jonomerowym. Wszystkie wypełnienia założono w ubytkach w zębach bocznych, zgodnie z instrukcją użycia.

Rezultaty: Wśród 282 wypełnień zaobserwowano 92 niepowodzenia, co oznacza, że po 17 latach uzyskano retencję wypełnień, znacznie przewyższającą 60%. Większość zbadanych wypełnień uzyskało oceny A lub B.
Wniosek: Po 17 latach zachowanie kliniczne wypełnień w zębach bocznych było wciąż akceptowalne.

... i zdjęcia wykonane po wielu latach.

Wypełnienia w zębach bocznych po 19 latach.
Zastosowane materiały: XRV Herculite, OptiBond FL
Autor: dr Bruce LeBlanc.



Wypełnienia klasy V po 13 latach
Zastosowane materiały: XRV Herculite, OptiBond FL
Autor: dr A.A. Boghosian



Wypełnienia w zębach bocznych po 16 latach
Zastosowane materiały: XRV Herculite, OptiBond FL
Autor: dr A.A. Boghosian





Wybierz bagaż doświadczeń.
25 lat marki Herculite®.

Zaufanie lekarzy



„Bardzo ciekawe w naszym zawodzie jest śledzenie zmian i unowocześnień wprowadzanych do materiałów stomatologicznych. Kiedy zaczynałam swoją drogę zawodową takim najnowszym osiągnięciem były światłoutwardzalne materiały kompozytowe. Zaczęłam od Herculite firmy Kerr i był to o tyle strzał w dziesiątkę, że pracuję nim do dzisiaj. Jako klasyczny kompozyt hybrydowy przeszedł zmiany dotyczące jego kolorystyki, ale koncepcja pozostała niezmienną. Doskonałe właściwości mechaniczne stawiają go nadal w czołówce materiałów kompozytowych. Wieloletnia dokumentacja naukowa sprawia, że w wielu badaniach traktowany jest obecnie jako standard do porównań z innymi materiałami. Łącznie z klasycznym systemem łączącym OptiBond FL po dwudziestu latach obecności na rynku jest nadal pewny i niezawodny.”

Dr Danuta Borczyk



„Z wypełnieniem Herculite marki Kerr pracuję od kilkunastu lat. Produkt ten nadaje się do wszystkich zębów, począwszy od siekaczy, skończywszy na trzonowcach. Posiada dużą gamę kolorów, zgodną z kolornikiem Vita, dzięki czemu jest niezawodny i pozwala na uzyskanie wspaniałego efektu kosmetycznego. Łatwość użycia, precyzja wykonania i dogodna konsystencja (produkt nie jest zbyt płynny, ani zbyt twardy) sprawiają, że praca z nim jest łatwa i przyjemna. Po wieloletnich obserwacjach śmiało mogę stwierdzić, że jest odporny i wytrzymały na naciski i złamania. Potwierdzam to ja i grono zadowolonych pacjentów! Wszyscy znają nazwę Herculite!!!”

Dr Beata Bednarowska



Herculite XRV to materiał wypełnieniowy z największą na świecie ilością badań klinicznych. Żaden inny materiał kompozytowy nie może poszczycić się takim wynikiem. Żaden inny nie osiągnął statusu „złotego standardu”. A ja bardzo lubię dobre i sprawdzone rozwiązania, bezpieczne dla moich pacjentów. A czy może być coś lepszego niż kompozyt, który jest na rynku od 25 lat i który sprawdził się w 250 milionach ubytków, u pacjentów na całym świecie? Lubię jego plastyczną konsystencję, która umożliwia modelowanie powierzchni pędzlem (to moja ulubiona technika pracy). Szeroka gama odcieni i w uniwersalny sposób dobrana przezierność pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet bardzo wymagających pacjentów. Wybierając Herculite XRV jestem pewna jego wytrzymałości i stabilności kolorystycznej, niezmiennej w czasie. Dla mnie to ciągle kompozyt z wyboru w większości sytuacji klinicznych.

Dr Monika Dzieciatkowska

Efekty które uzyskuje się każdego dnia

Pacjentka lat 15 zgłosiła się celem rekonstrukcji szczątkowego zęba 12. W przyszłości planowana licówka ceramiczna. Ze względu na młody wiek pacjentki i zalecane współcześnie zachowawcze podejście do technik rekonstrukcyjnych, nie zastosowano żadnej preparacji szkliwa, a jedynie wytrawianie kwasem ortofosforowym przez 60 sek. i system łączący OptiBond FL. Rekonstrukcję wykonano z jednego odcienia materiału kompozytowego Herculite Classic Enamel B1. Piękny połysk wypełnienia można uzyskać stosując szczotki z włosia koziego i filce oraz pasty polerskie Shiny A, B i C

Estetyczna korekta w odcinku przednim Zdjęcia dzięki uprzejmości dr Moniki Dzieciatkowskiej



Pacjent zgłosił się celem wymiany korony na zębie 25. Przed tą procedurą konieczna okazała się wymiana wypełnienia w sąsiednim trzonowcu. Usunięto stare wypełnienie. Po założeniu matryc sekcyjnych (Hawe Adept Sectional Matrix System), które uszczelniono klinem drewnianym (KerrHawe) zastosowano technikę całkowitego wytrawiania i system łączący IV generacji (Syntac Classic). Odrobina płynnego kompozytu na dno ubytku poprawia adaptację wewnętrzną materiału kompozytowego. Zastosowano odcienie zębinowy A3 i szkliny A2/A3 materiału Herculite Classic. Przed ostatnią warstwą szkliny zaaplikowano niewielką ilość podbarwiacza w kolorze ochry i brązowym (system podbarwiaczy Kolor Plus, KerrHawe) by całość odbudowy upodobnić do pozostałych struktur zęba. Opracowanie wstępne - wiertła diamentowe 40 mikronów. Polerownie - krążki OptiDisc i szczotka Occlubrush.

Ubytki w zębach bocznych Zdjęcia dzięki uprzejmości dr Moniki Dzieciatkowskiej



Dziękujemy za zaufanie i za wkład w ponad 250 milionów wypełnień wykonanych z użyciem Herculite XRV na całym świecie!



Wybierz bagaż doświadczeń.
25 lat marki Herculite®.

Herculite XRV Anniversary Kit

Dziękując za zaufanie i lojalność mamy przyjemność zaoferować Państwu Herculite XRV Anniversary Kit - limitowaną edycję materiału Herculite, która zawiera zestaw do preparacji estetycznych, opracowany przez dr. Douglasa Terry'ego.



Dr Douglas Terry jest znanym wykładowcą, który w trakcie wykładów i warsztatów praktycznych omawia zagadnienia związane ze stomatologią estetyczną i adhezyjną. Otrzymał wiele nagród i opublikował ponad 230 artykułów na temat stomatologii estetycznej, które ukazały się w wielu językach. Jest autorem książki "Natural Aesthetics with Composite Resin." Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów wydawniczych i jest aktywnym członkiem licznych amerykańskich i międzynarodowych towarzystw stomatologicznych oraz zespołów oceniających materiały i konsultantem wielu producentów w zakresie rozwoju i poprawy właściwości produktów. Obecnie pełni funkcję profesora pomocniczego w Department of Restorative Dentistry and Biomaterials, University of Texas Health Science Center Dental Branch at Houston, Texas. Jest założycielem i CEO Institute of Esthetic and Restorative Dentistry. Prowadzi także prywatną praktykę w Houston, gdzie zajmuje się stomatologią odtwórczą.



Zestaw wiertel "Esthetic Preparations by Dr. Douglas Terry", który znajduje się w opakowaniu Herculite XRV Anniversary Kit.



Zawartość zestawu:

- strzykawek Herculite XRV w kolorach: Enamel A1, 2xA2, 2xA3, A3.5, Dentine A2, A3,
- OptiBond Solo Plus, butelka 5 ml,
- wytrawiacz Gel Etchant wraz z końcówkami,
- aplikatory,
- ulotka: 25 lat sukcesu klinicznego XRV Herculite,
- zestaw wiertel 31152 "Esthetic Preparations by Dr. Douglas Terry", Beavers Kit# 00490024.

Skład zestawu wiertel "Esthetic Preparations by Dr. Douglas Terry":

Stożki z zaokrąglonym wierzchołkiem

- 450421-BD1 / FG786C /
- 450408-BD1 / FG777C /

Wiertła do kształtowania powierzchni żującej:

- 450294 -BD1 / FG630C /
- 450295-BD1 / FG630F /

Wiertła płomykowe:

- 450092-BD1 / FG216R /
- 450226-BD1 / FG510C /

Wiertła do kształtowania i wyrównywania:

- 450170-BD1 / FG4250 /
- 00450174 / FG431F /
- 00450518 / FGLR1R /


Liczba zestawów ograniczona. Oferta ważna do... lub do wyczerpania zapasów



Wybierz bagaż doświadczeń.
25 lat marki Herculite®.

Specjalna okazja wymaga specjalnych nagród

15 x

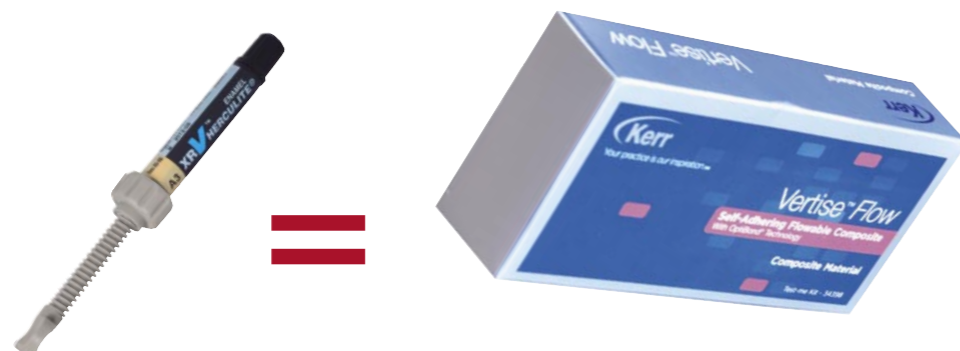

Prześlij do nas 15 pustych strzykawk po Herculite XRV, a w nagrodę otrzymasz zestaw Test-Me Kit samoadhezyjnego materiału kompozytowego Vertise Flow.
Zawartość zestawu: 1 x 2 g strzykawka z materiałem w odcieniu A2, 10 końcówek aplikacyjnych, 10 pędzelków, instrukcja obrazkowa, instrukcja użycia.

30 x



Prześlij do nas 30 pustych strzykawk po Herculite XRV, a w nagrodę otrzymasz zestaw Assorted Kit samoadhezyjnego materiału kompozytowego Vertise Flow.
Zawartość zestawu: 4 x 2 g strzykawki z materiałem w odcieniach: A2, A3, A3.5, Universal Opaque, 40 końcówek aplikacyjnych, 40 pędzelków, instrukcja obrazkowa, instrukcja użycia.

Puste strzykawki wraz z danymi adresowymi należy przesłać pod adres: Kerr SpofaDental Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa. Nagrody zostaną przesłane pocztą, w ciągu czternastu dni od momentu otrzymania przesyłki ze strzykawkami. Promocja jest ważna do 30 września lub do wyczerpania zapasów.

Kosmiczny zestaw! Za jedną opinię!

Prześlij do nas opinię na temat Herculite XRV wraz z dowodem zakupu dowolnego zestawu tego produktu, a będziesz miał szansę wygrania jednego z trzech kompletów ekskluzywnych walizek podróżnych **Samsonite Cosmolite Spinner**, każdy o wartości 3 600 PLN.

Regulamin promocji
Opinię na temat produktu wraz z dowodem zakupu (kopia faktury lub rachunku) Herculite XRV należy przesyłać do dnia 15 października 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Kerr SpofaDental Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa. Do korespondencji należy dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na wykorzystanie opinii i danych osobowych uczestnika o następującym brzmieniu:
Oświadczam, iż jestem autorem niniejszej opinii o materiale Herculite XRV. Wyrażam zgodę na jej wykorzystanie w materiałach marketingowych firmy Kerr wraz z podaniem mojego imienia i nazwiska jako autora opinii." Data, podpis. Jury w składzie: dr Monika Dzieciatkowska, dr Aleksander Maj, dr Dariusz Miskiewicz, Kamila Wojtulewska-Hańczaruk spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze trzy najciekawsze opinie. Autorzy tych opinii otrzymają nagrody* w postaci zestawów walizek **Samsonite Cosmolite Spinner o wartości 3600 PLN**. Szczegółowe informacje dotyczące promocji dostępne są w siedzibie firmy, tel. 22 654 40 06, fax 22 654 40 07, e-mail: biuro@kerrhawe.com

*Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z otrzymania nagrody leżą po stronie nagrodzonego.



Wygraj jeden z trzech kosmicznych zestawów walizek Samsonite Cosmolite Spinner w kolorach metalizujących - czarnym, czerwonym lub niebieskim. W każdym zestawie walizki w rozmiarach 55 cm, 68 cm i 74 cm.



Wybierz bagaż doświadczeń.
25 lat marki Herculite®.

Oferta kolorów i przezierności, której nie powstydzilyby się nawet najbardziej estetyczne materiały kompozytowe.

Herculite XRV - zestawy

Herculite XRV Esthetic Kit + OptiBond Solo Plus - zestaw estetyczny z materiałem w strzykawkach i systemem wiążącym OptiBond Solo Plus

nr kat. 30893



Zawartość: 16 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach szkliniowych A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4; 7 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach zębinowych A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2; 2 x 2.5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach Incisal Medium i Incisal Light (odcień brzegu siecznego średni i jasny); 1 x 5 ml butelka OptiBond Solo Plus; 1 x 3 g strzykawkę z wytrawiaczem Kerr Gel Etchant; 10 jednorazowych końcówek aplikacyjnych do wytrawiacza; 25 jednorazowych tacek do systemów wiążących; 50 jednorazowych aplikatorów.

Herculite XRV General + OptiBond Solo Plus - zestaw z materiałem w strzykawkach

nr kat. 30894



Zawartość: 10 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach szkliniowych A1, A3, A3.5, B1, B3, C2, C3, D2, D3; 4 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach zębinowych A2, B1, C2, D2; 2 x 2.5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach Incisal Medium i Incisal Light (odcień brzegu siecznego średni i jasny); 1 x 5 ml butelka OptiBond Solo Plus; 1 x 3 g strzykawkę z wytrawiaczem Kerr Gel Etchant; 10 jednorazowych końcówek aplikacyjnych do wytrawiacza; 25 jednorazowych tacek do systemów wiążących; 50 jednorazowych aplikatorów.

Herculite XRV Custom Kit

nr kat. 62801



Zawartość: 3 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach szkliniowych A2, A3, A3.5; 3 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach zębinowych A2, A3, A3.5; 1 x 5 ml butelka OptiBond Solo Plus; 1 x 5 g butelka OptiGuard; 1 x 3 g strzykawkę z wytrawiaczem Kerr Gel Etchant; 10 jednorazowych końcówek aplikacyjnych do wytrawiacza; 25 jednorazowych tacek do systemów wiążących; 50 jednorazowych aplikatorów.

Herculite XRV Custom Kit

nr kat. 62804



Zawartość: 5 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach szkliniowych A1, A2 (2x), A3, D2; 1 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniu zębinowym A2; 1 x 5 ml butelka OptiBond Solo Plus; 1 x 5 g butelka OptiGuard; 1 x 3 g strzykawkę z wytrawiaczem Kerr Gel Etchant; 10 jednorazowych końcówek aplikacyjnych do wytrawiacza; 25 jednorazowych tacek do systemów wiążących; 50 jednorazowych aplikatorów.

Herculite XRV Custom Kit

nr kat. 62805



Zawartość: 4 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach szkliniowych A2 (2x), A3 (2x), 2 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach zębinowych A2 i A3; 1 x 5 ml butelka OptiBond Solo Plus; 1 x 5 g butelka OptiGuard; 1 x 3 g strzykawkę z wytrawiaczem Kerr Gel Etchant; 10 jednorazowych końcówek aplikacyjnych do wytrawiacza; 25 jednorazowych tacek do systemów wiążących; 50 jednorazowych aplikatorów.

Herculite XRV Custom Kit

nr kat. 62811



Zawartość: 4 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach szkliniowych A1, A2, A3, B2; 2 x 5 g strzykawkę z materiałem w odcieniach zębinowych A2, A3; 1 x 5 ml butelka OptiBond Solo Plus; 1 x 5 g butelka OptiGuard; 1 x 3 g strzykawkę z wytrawiaczem Kerr Gel Etchant; 10 jednorazowych końcówek aplikacyjnych do wytrawiacza; 25 jednorazowych tacek do systemów wiążących; 50 jednorazowych aplikatorów.

Herculite XRV - uzupełnienia

Herculite XRV, uzupełnienia odcieni szkliniowych (Enamel) i zębinowych (Dentine)

Każde opakowanie zawiera 1 x 5 g strzykawkę z materiałem w wybranym odcieniu.

	Odcienie A					Odcienie B				Odcienie C				Odcienie D		
	A1	A2	A3	A3.5	A4	B 1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Enamel	22859	222860	22861	22862	22863	22864	22865	22866	22867	22868	22869	22870	22871	22872	22873	22874
Dentine	23391	22875	22876	22877	23390	22878	22879	23389	23388	23387	22880	23386	23385	22881	23384	23392

Herculite XRV, uzupełnienia odcieni przyszyjkowych

Każde opakowanie zawiera 1 x 5 g strzykawkę z materiałem w wybranym odcieniu.

Czerwono-brązowy nr kat. 23145
Szaro-brązowy, nr kat. 23146
Żółto-brązowy nr kat. 23147

Herculite XRV- uzupełnienia odcieni brzegu siecznego

Każde opakowanie zawiera 1 x 2,5 g strzykawkę z materiałem w wybranym odcieniu.

Jasny nr kat. 22882
Średni nr kat. 22883



Bezpośredni importerzy materiałów Kerr w Polsce:

Marrodent®

ul. Krasieńskiego 31
43-300 Bielsko - Biala
Tel.: (33) 815 20 13
Fax: (33) 815 22 67

Technetsa Sp. z o.o.

ul. Młodzieńcza 36
03-665 Warszawa
Tel.: (22) 811 79 02
Fax: (22) 614 26 26

**Centrum Zaopatrzenia
Medycznego „CEZAL” S.A**

ul. Widna 4
50-543 Wrocław
Tel.: (71) 367-80-27/29
Fax (71) 373-21-01

Kol-Dental

ul. Ostrobramska 73
04-175 Warszawa
Tel.: (22) 514 62 00
(22) 514 62 91

Hansen Dental

ul. Składowa 26/28
90-127 Łódź
Tel.: (42) 630-33-77
Fax: (42) 632-66-67

PZM Marku

Al. Armii Krajowej 2
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 374-05-25

The Kerr logo, consisting of the word 'Kerr' in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a white, stylized oval shape.

Kerr SpofaDental a.s. Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa
tel. +48 22 654 40 06, fax +48 22 654 40 07
e-mail: biuro@kerrhawe.pl, www.kerrhawe.pl